


# MP *mlh+* Kortform bruksanvisning

Løsne sprøyten før sprøytestempelet frigjøres

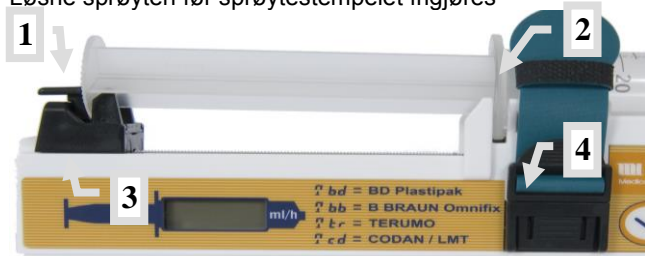

## Programmere sprøytepumpen

Trykk & , og hold tastene nede 1 sekund for å slå på pumpen



Trykk for å velge det sprøytemerket som skal brukes.



Trykk for å velge den sprøytestørrelsen som skal brukes.



Trykk eller for henholdsvis øke eller minske hastigheten.



Trykk og hold inne i 1 sekund slik at CAL vises for å starte infusjonen.



Stoppe infusjonen- Slå AV pumpen:  
Trykk og hold inne i 3 sekunder.



For å endre hastighet under infusjonen:

Sett inn ny hastighet og hold inne i 3 sekunder. Trykk helt til CAL vises i skjermen

## Varsler:

Pumpen i stand by:  
Blinkende tall, start infusjon.



Lavt batterinvå.



Nær slutten av infusjon.



## Alarmer

Pumpen vil stoppe ved alarm.  
Slå pumpen av for å kansellere alarmen



Okklusjon eller at sprøytestempel er i bunn



Utladet batteri:  
Slå av pumpen og bytt alle batteriene.



Teknisk alarm.  
Noter koden. Slå pumpen av og på igjen. Ikke bruk pumpen hvis alarmen fortsatt er til stede.



Feilplassert sprøyte .  
Se til at sprøytes fingergrep passer inn i spalten på pumpen og at stempelets runde ende del passer i stempeldriverens spor. Se til at festestroppen er stram.



Ingen sprøytemerke eller sprøytevolum er valgt.



For detaljerte instruksjoner, se fullstendig bruksanvisning.